

1. DADOS DO PRODUTO

Nome do produto: CLAMP UMBILICAL

NCM: 9018.90.95

Códigos Produto:

PRODUTO	REGISTRO ANVISA	CÓDIGO REFERÊNCIA	CÓDIGO SIMPRO
Clamp umbilical	10237610197	960001003	285432

2. IMAGEM



3. DESCRIÇÃO

Clamp umbilical descartável indicado para clameamento/fechamento do cordão umbilical.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricado em resina de engenharia resistente, atóxico, antialérgico, na cor branca. Possui formato em V, de corpo único, com bordas arredondas e parte interna duplamente serrilhada, com desnível e sistema de travamento duplo com lacre definitivo.

Dimensões

Comprimento: 54 mm

Largura: 10 mm (fechado).

Espessura parte serrilhada: 5 mm

5. ESTERILIZAÇÃO, EMBALAGEM E APRESENTAÇÃO COMERCIAL

PRODUTO	ESTERILIZAÇÃO	TIPO DE EMBALAGEM	APRESENTAÇÃO COMERCIAL	MÚLTIPLO DE EXPEDIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA
960001003	Estéril em ETO	Papel grau cirúrgico e filme plástico	Peça	100	1500

6. INSTRUÇÕES DE USO

Utilizar dois clamps. O primeiro deve ser colocado e travado cerca de 2-3 cm de distância em relação ao abdome do recém-nascido e o segundo deve ser colocado cerca de 1-2 cm em relação ao primeiro clamp, cortar em seguida com uma tesoura estéril. Certificar que não haja nenhum sangramento pelo cordão umbilical. Após o uso, descartar em local apropriado.

7. VALIDADE PRODUTO E ESTERILIZAÇÃO

Dois (2) anos ou até abertura da embalagem e/ou violação da mesma.

8. ARMAZENAMENTO

Armazenar em local fechado, temperatura ambiente, livre de umidade, elevado do solo.

9. ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES

- Verifique a integridade da embalagem antes de usar. Não utilizar se a embalagem estiver violada.
- Certifique-se da integridade do produto. Se danificado, não o utilize.
- Produto descartável. Após o uso descartar em local apropriado, de acordo com os critérios de biossegurança para descarte de lixo contaminado comum.
- Não há contraindicações conhecidas.

10. CERTIFICAÇÕES

Empresa com controle e garantia total de qualidade de acordo com as normativas nacionais da RDC 665/2022 e internacionais da ISO 13.485:2016

11. FABRICANTE

Kolplast CI LTDA

Estrada Municipal Benedito de Souza, 418. Bairro da Mina, Itupeva – SP.

Indústria Brasileira