

1. DADOS DO PRODUTO

Nome do produto: FOCO CLÍNICO LED

NCM: 9018.19.80

Códigos Produto:

DESCRIÇÃO	REGISTRO ANVISA	CÓDIGO REFERÊNCIA
Foco Clínico Led com espelho	10237619015	10.1212

2. IMAGEM



### 3. DESCRIÇÃO

Foco clínico com iluminação LED de pedestal para iluminação em diversos procedimentos.

### 4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cabeçote com haste flexível para direcionamento do feixe de luz, com altura regulável, base com quatro rodízio, ângulo de curvatura de 15°, altura regulável entre 1,10 m a 1,60 m na cor branca. Chave ON/OFF no cabeçote.

Iluminação: Lâmpada LED Dicroico 80 a 240V / 4W, com feixe luminoso de 80 a 100 lumens, luz branca, com temperatura da cor entre 6.000 ~ 6.500 K.

Elétrica: Tensão de alimentação de 115 a 230 V (automático) – 50/60Hz, acompanha fusível F 0,25AL/250 V de fácil acesso para manutenção e cabo de alimentação elétrica de 2 metros.

Acessório: Espelho plano com área espelhada de 113 mm.

### 5. APRESENTAÇÃO COMERCIAL E EMBALAGEM

PRODUTO	TIPO DE EMBALAGEM	APRESENTAÇÃO COMERCIAL
10.1212	Caixa papel ondulado	Unitário

### 6. INSTRUÇÕES DE USO

Coloque o Foco Clínico em uma superfície plana. Conecte o cabo de alimentação elétrica na rede elétrica, acionar a chave ON/OFF localizada na parte posterior do cabeçote, posicionar o cabeçote no melhor ângulo, posição e altura para perfeita iluminação do local a ser examinado ou realizado procedimento clínico/cirúrgico.

### 7. GARANTIA

Doze (12) meses a partir da data de emissão da nota fiscal.

### 8. ARMAZENAMENTO

Armazenar em local fechado, temperatura ambiente, livre de umidade.

### 9. ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES

- Desembale o equipamento com cuidado e verifique se todos os itens que compõem o equipamento estão presentes.
- Proceder a montagem conforme manual de instruções.
- Colocar sempre o equipamento em uma superfície plana.
- Evite queda. Evite contato com água ou respingo d'água.

- Higienize o equipamento com auxílio de compressa umedecida com álcool a 70% e realize a limpeza externa de todo o conjunto. Em hipótese alguma limpe o equipamento internamente.
- Não utilizar abrasivos, como palha de aço, solventes orgânicos, tiner ou compostos corrosivos.
- Não há contraindicações conhecidas.

#### 10. CERTIFICAÇÕES

Empresa com controle e garantia total de qualidade de acordo com as normativas nacionais da RDC 665/2022 e internacionais da ISO 13.485:2016

#### 11. FABRICANTE

Kolplast CI SA

Estrada Municipal Benedito de Souza, 418. Bairro da Mina, Itupeva – SP.

CNPJ: 59.231.530/0001-93

Indústria Brasileira