

DESCRIPTIVO TÉCNICO DE PRODUTO



1. DADOS DO PRODUTO

Nome do produto: KIT BANHO 3 KOLPLAST

NCM: 9616.20.00

Códigos Produto:

PRODUTO	CÓDIGO REFERENCIA	NÚMERO DE PROCESSO
Kit banho 3	20.2977	25351.449575/2024-53

2. IMAGEM



3. DESCRIÇÃO

Kit para banho com esponja para higiene corporal impregnada com gel dermatológico semelhante ao sabonete. Limpa, hidrata e suaviza a pele, ativa a circulação, elimina células mortas, evita contágio por bactérias e fungos, evita a desidratação da pele e toalha macio e altamente absorvente para secar o paciente.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Kit composto por:

- 4 esponjas confeccionadas em poliéster, altamente absorvente, macia e isenta de impurezas, nas dimensões e 19,5 x 12 cm de comprimento e 0,5 cm de espessura. Composição química: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, Disodium Cocoamphodiacetate, Citric Acid,

Parfum, Lactic Acid, Propylene Glycol, Malic Acid, Rosmarinus Officinalis Extract, Camelia Sinensis Leaf EXtract, Citrus Aurantium Amara Flower Extract, CI 42090, CI 47005, CI 61570, Sodium Chloride, Sodium Sulfate, Sodium Hydroxide, Benzophenone-4. pH: 5,5.

Cor: verde, com listras brancas.

- 1 toalhas em poliéster com viscose, muito macia e altamente absorvente, na cor branca. Tamanho 50 x 60 cm.

5. ESTERILIZAÇÃO, EMBALAGEM E APRESENTAÇÃO COMERCIAL

PRODUTO	ESTERILIZAÇÃO	TIPO DE EMBALAGEM	APRESENTAÇÃO COMERCIAL	MÚLTIPLO DE EXPEDIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA
20.2977	Não estéril	Embalagem plástica com aba selante	Unitário	200	200

6. INSTRUÇÕES DE USO

De acordo com a técnica de domínio do profissional de saúde para realização de higiene corporal.

Umedecer parcialmente a esponja com água morna, retirar o excesso de água, ensaboar a pele do paciente suavemente com movimentos contínuos, enxaguar conforme necessidade ou retirar o excesso de espuma com a toalha, e com a outra toalha secar a pele do paciente.

7. VALIDADE PRODUTO E ESTERILIZAÇÃO

Três (3) anos ou até abertura da embalagem e/ou violação da mesma.

8. ARMAZENAMENTO

Armazenar em local fechado, temperatura ambiente, livre de umidade, elevado do solo

9. ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES

- Verifique a integridade da embalagem antes de usar. Não utilizar se a embalagem estiver violada, danificada ou molhada.
- Variações de tonalidade podem ocorrer nas partes ou componentes coloridos devido ao processo de pigmentação, sem impacto na segurança, funcionalidade ou desempenho do produto.
- Inspeção a esponja antes do uso. Se apresentar algum tipo de dano, rasgo, sujidade não utilizar.
- Produto de uso único, descartar após o uso. O descarte deve seguir as normas de biossegurança para lixo hospitalar.
- Este produto se destina à higiene corporal. Indicada para todos os tipos de pele.
- Em caso de irritação da pele, suspender o uso.
- A esponja reage com a água liberando o sabonete formando espuma.

- Use quantidades reduzidas de água para não liberar todo o sabonete de uma só vez.
- Avalie atentamente a região a ser higienizada para decidir pelo enxague ou não.
- O enxague é se necessário. Podendo ser removido o excesso de espuma com uma toalha úmida e posterior secagem com uma toalha seca.
- Fazer a higienização da pele com delicadeza e suavidade, não é necessário aplicar força ou pressão para remover qualquer sujidade.
- A esponja deve ser trocada entre a lavagem da cabeça, dos membros, tronco e genitais.
- Considerar o uso de EPI adequado para o procedimento de higienização corporal
- Não utilizar em feridas com tecido vitalizado. Não utilizar em mucosa.

10. CERTIFICAÇÕES

Empresa com controle e garantia total de qualidade de acordo com as normativas nacionais da RDC 665/2022 e ISO 13.485:2016.

11. FABRICANTE

Kolplast CI LTDA

Estrada Municipal Benedito de Souza, 418. Bairro da Mina, Itupeva – SP.

Indústria Brasileira