

DESCRIPTIVO TÉCNICO DE PRODUTO



1. DADOS DO PRODUTO

Nome do produto: KIT HIGIENE ÍNTIMA

NCM: 9616.20.00

Códigos Produto:

PRODUTO	CÓDIGO REFERENCIA	NÚMERO DE PROCESSO	CÓDIGO SIMPRO
Kit Higiene íntima	10.4196	25351.349072/2023-06.	342368

2. IMAGEM



3. DESCRIÇÃO

Kit para higiene íntima com esponja impregnada com gel dermatológico semelhante ao sabonete. Limpa, hidrata e suaviza a pele, ativa a circulação, elimina células mortas, evita contágio por bactérias e fungos, evita a desidratação da pele e toalha macio e altamente absorvente para secar o paciente.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Kit composto por:

- 2 esponjas confeccionadas em poliéster, altamente absorvente, macia e isenta de impurezas, nas dimensões e 19,5 x 12 cm de comprimento e 0,5 cm de espessura. Composição química: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, Disodium Cocoamphodiacetate, Citric Acid, Parfum, Lactic Acid, Propylene Glycol, Malic Acid, Rosmarinus Officinalis Extract, Camelia Sinensis Leaf EXtract, Citrus Aurantium Amara Flower Extract, CI 42090, CI 47005, CI 61570, Sodium Chloride, Sodium Sulfate, Sodium Hydroxide, Benzophenone-4. pH: 5, na cor verde, com listras brancas.
- 1 toalhas em poliéster com viscose, muito macia e altamente absorvente, na cor branca. Tamanho 40 x 80 cm.

5. ESTERILIZAÇÃO, EMBALAGEM E APRESENTAÇÃO COMERCIAL

PRODUTO	ESTERILIZAÇÃO	TIPO DE EMBALAGEM	APRESENTAÇÃO COMERCIAL	MÚLTIPLO DE EXPEDIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA
10.4196	Não estéril	Envelope Papel grau cirúrgico e filme de plástico	Unitário	60	60

6. INSTRUÇÕES DE USO

De acordo com a técnica de domínio do profissional de saúde para realização da higiene íntima.

Umedecer parcialmente a esponja com água morna, retirar o excesso de água, ensaboar a região vulvar ou peniana, perineal e perianal, de cima para baixo suavemente com movimentos contínuos, enxaguar e secar com a toalha absorvente essas regiões de cima para baixo.

7. VALIDADE PRODUTO E ESTERILIZAÇÃO

Três (3) anos ou até abertura da embalagem e/ou violação da mesma.

8. ARMAZENAMENTO

Armazenar em local fechado, temperatura ambiente, livre de umidade, elevado do solo

9. ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES

- Verifique a integridade da embalagem antes de usar. Não utilizar se a embalagem estiver violada, danificada ou molhada.

- Inspeção a esponja e a toalha antes do uso. Se apresentar algum tipo de dano, rasgo, sujeira não utilizar.
- Produto de uso único, descartar após o uso. O descarte deve seguir as normas de biossegurança para lixo hospitalar.
- Este produto se destina à higiene corporal. Indicada para todos os tipos de pele.
- Em caso de irritação da pele, suspender o uso.
- A esponja reage com a água liberando o sabonete formando espuma.
- Use quantidades reduzidas de água para não liberar todo o sabonete de uma só vez.
- Fazer a higienização da pele com delicadeza e suavidade, não é necessário aplicar força ou pressão para remover qualquer sujeira.
- Considerar o uso de EPI adequado para o procedimento de higienização corporal

10. CERTIFICAÇÕES

Empresa com controle e garantia total de qualidade de acordo com as normativas nacionais da RDC 665/2022 e ISO 13.485:2016.

11. FABRICANTE

Kolplast CI LTDA

Estrada Municipal Benedito de Souza, 418. Bairro da Mina, Itupeva – SP.

Indústria Brasileira