

## DESCRITIVO TÉCNICO DE PRODUTO



### 1. DADOS DO PRODUTO


Nome do Produto: PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO

NCM: 3916.90.90

Códigos Produto:

PRODUTO	REGISTRO ANVISA	CÓDIGO REFERÊNCIA	CÓDIGO SIMPRO
Pulseira de identificação Branca. Infantil	<b>Isento</b>	980001001	307325
Pulseira de identificação Branca. Adulto	<b>Isento</b>	980002001	307324
Pulseira de identificação mãe e filho. Branco	Isento	980003001	307326

### 2. IMAGEM

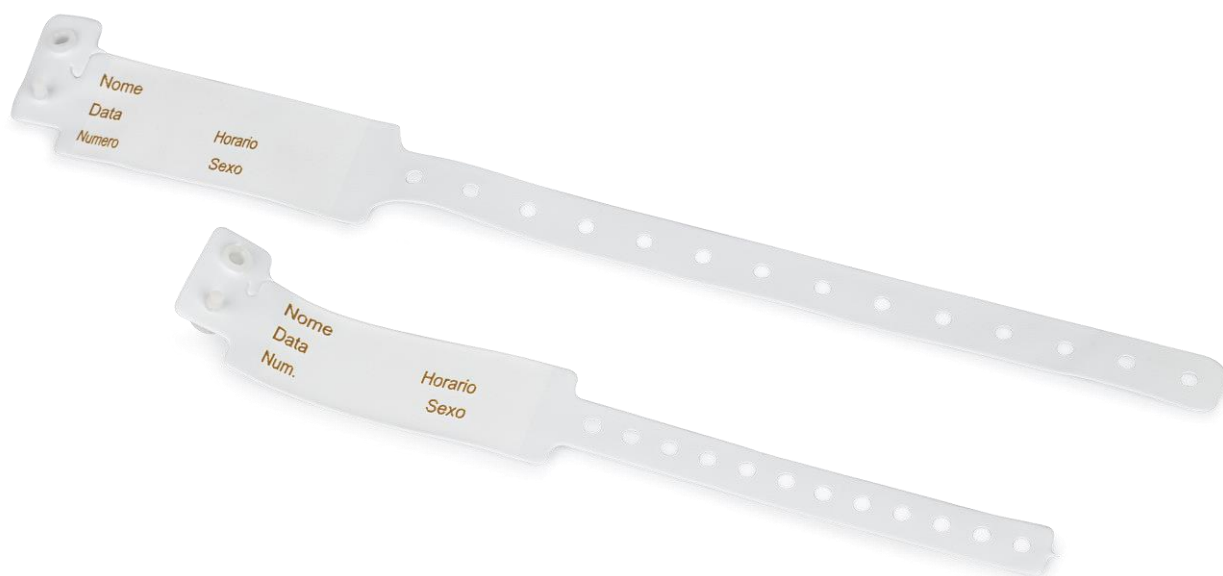

### 3. DESCRIÇÃO

Pulseira de identificação descartável para identificação e controle do binômio mãe/filho, e de pacientes de uma forma geral.

### 4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricada em PVC, na cor branca, com orifícios de ajuste e fechamento por trava tipo "POM". Apresenta campo disponível para preenchimento dos dados a caneta ou impressora do tipo zebra: nome, sexo, data, horário, e número de leito ou prontuário.

#### Medidas modelo infantil

Comprimento: aproximadamente 170mm ( $\pm$  10mm)

Largura: aproximadamente 18 mm ( $\pm$  5mm)

Orifícios de regulagem: mínimo 11

#### Medidas modelo adulto

Comprimento: aproximadamente 250 mm ( $\pm$  10mm)

Largura: aproximadamente 25 mm ( $\pm$  5mm)

Orifícios de regulagem: mínimo 11

### 5. ESTERILIZAÇÃO, EMBALAGEM E APRESENTAÇÃO COMERCIAL

PRODUTO	ESTERILIZAÇÃO	TIPO DE EMBALAGEM	APRESENTAÇÃO COMERCIAL	MÚLTIPLO DE EXPEDIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA
980001001	Não estéril	Embalagem plástica com 100 unidades	Caixa com 500 unidades	1	10
980002001	Não estéril	Embalagem plástica com 100 unidades	Caixa com 500 unidades	1	9
980003001	Não estéril	Embalagem plástica com 50 pares	Caixa com 250 pares	1	15

### 6. INSTRUÇÕES DE USO

Abriu a embalagem, proceder a identificação dos campos com caneta esferográfica, envolver a pulseira no punho do paciente, regular para melhor conforto do paciente e de modo a impedir o deslocamento da pulseira, pressionar os botões para fechamento. Para retirar, cortar a pulseira com tesoura.

### 7. VALIDADE PRODUTO

Dois (2) anos a partir da data de fabricação

### 8. ARMAZENAMENTO

Armazenar em local fechado, temperatura ambiente, livre de umidade, elevado do solo.

### 9. ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES

- Verifique a integridade da embalagem antes de usar. Não utilizar se a embalagem estiver violada.
- Certifique-se da integridade do produto. Se danificado, não o utilize.
- Produto descartável. Após o uso descartar em local apropriado, de acordo com os critérios de biossegurança para descarte de lixo contaminado comum.
- Regular a pulseira de modo que fique confortável no punho do paciente sem garrotear. A pulseira deve ficar bem posicionada, de modo que não saia.
- Para fechamento dos botões, os mesmos devem estar centralizados para que o abotoamento seja eficaz. O abotoamento é definitivo.
- Utilizar tesoura de ponta romba para cortar a pulseira após o seu uso.
- Não há contraindicações conhecidas.

### 10. CERTIFICAÇÕES

Empresa com controle e garantia total de qualidade de acordo com as normativas nacionais da RDC 16/2013 e internacionais da ISO13485.

### 11. FABRICANTE

Kolplast CI SA

Estrada Municipal Benedito de Souza, 418. Bairro da Mina, Itupeva – SP.

CNPJ: 59.231.530/0001-93

Indústria Brasileira