

DESCRITIVO TÉCNICO DE PRODUTO



1. DADOS DO PRODUTO

Nome do produto: KIT PARA IDENTIFICAÇÃO DE SOLUÇÕES

NCM: 9018.90.99

Códigos Produto:

CÓDIGO REFERENCIA	REGISTRO ANVISA	CÓDIGO SIMPRO
10.4201	isento	348012

2. IMAGEM



3. DESCRIÇÃO

Kit indicado antissepsia e diferenciação de líquidos incolores, como medicamentos, antissépticos, água destilada, soro fisiológico. Desenvolvido para evitar erros na utilização destes, em procedimentos médicos ou de enfermagem invasivos ou não invasivos, como em intraoperatórios cirúrgicos, anestesia, procedimentos em hemodinâmica, antissepsia, além de outros procedimentos que requeiram recipientes para líquidos incolores

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Kit composto por:

- 1 cupula vermelha, fabricada em polipropileno, com capacidade para 250 ml, sendo seu maior diâmetro 9 cm, menor 6 cm e altura de 5,7 cm;
- 1 cupula verde, fabricada em polipropileno, com capacidade para 250 ml, sendo seu maior diâmetro 9 cm, menor 6 cm e altura de 5,7 cm;
- 1 cupula amarela, fabricada em polipropileno, com capacidade para 250 ml, sendo seu maior diâmetro 9 cm, menor 6 cm e altura de 5,7 cm;
- 1 cuba rim, fabricada em polipropileno, com capacidade para 600 ml, na cor branca;
- 1 pinça modelo pean ou coração, fabricada em resina de engenharia, com 19 cm de comprimento.
- 1 campo para cobertura de mesa, em SMS, 100% em polipropileno laminado em polietileno, absorvente, impermeável, gramatura de 50g/m² com 80 cm x 80 cm de comprimento;

Todos os componentes são embrulhados no campo cobertura de mesa, no formato “envelope”, de modo a permitir a abertura na técnica asséptica

5. ESTERILIZAÇÃO, EMBALAGEM E APRESENTAÇÃO COMERCIAL

PRODUTO	ESTERILIZAÇÃO	TIPO DE EMBALAGEM	APRESENTAÇÃO COMERCIAL	MÚLTIPLO DE EXPEDIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA
10.4201	Estéril em ETO	Papel grau cirúrgico e filme plástico	Peça	NA	NA

6. INSTRUÇÕES DE USO

Abrir a embalagem na técnica asséptica sob a mesa auxiliar. Utilizar o campo cirúrgico como cobertura de mesa afim de manter a esterilidade dos demais componentes. Utilizar a pinça pean com auxílio de compressas de gaze ou algodão para a antisepsia da pele de acordo com técnica de domínio do profissional. A cuba rim e as cúpulas coloridas devem ser utilizadas de acordo com o protocolo preconizado da instituição para identificação de medicamentos, antissépticos, soro fisiológico ou outros líquidos incolores, cujo principal objetivo é auxiliar a equipe médica, facilitando a visualização por cor, para cada solução utilizada, evitando erros no momento do procedimento.

Sugestão de uso das cúpulas coloridas em mesa cirúrgica ou hemodinâmica:

Vermelha: para contrastes ou anestésicos ou adrenalina ou descarte temporário de psicotrópicos

Amarela: soro fisiológico

Verde: água destilada, antissépticos (aquoso ou alcoólico) ou descarte temporário de medicamentos analgésicos e não psicotrópicos

7. VALIDADE PRODUTO E ESTERILIZAÇÃO

Dois (2) anos ou até abertura da embalagem e/ou violação da mesma.

8. ARMAZENAMENTO

Armazenar em local fechado, temperatura ambiente, livre de umidade, elevado do solo

9. ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES

- Verifique a integridade da embalagem antes de usar. Não utilizar se a embalagem estiver violada, danificada ou molhada.
- Inspeção previamente antes do uso. Se danificado, não utilize.
- Produto de uso único, descartável, destruir após o uso. O descarte deve seguir as normas de biossegurança para lixo hospitalar.
- Não há contraindicações conhecidas.

10. CERTIFICAÇÕES

Empresa com controle e garantia total de qualidade de acordo com as normativas nacionais da RDC 665/2022 e internacionais da ISO 13.485:2016

11. FABRICANTE

Kolplast CI LTDA

Estrada Municipal Benedito de Souza, 418. Bairro da Mina, Itupeva – SP.

Indústria Brasileira